

Компактная дыхательная система линейки аппаратов Dräger Fabius

Порядок разборки и сборки



Разборка

1 Отсоедините все шланги, кабели и абсорбер, снимите дыхательную систему.

Подсоедините дыхательную систему, подключите все шланги, кабели и абсорбер. **9**

2 Отвинтите CLIC адаптер (опционально) на контейнере абсорбера. Визуально проверьте герметичность CLIC адаптера.

Проверьте наличие всех фиксаторов. Прикрутите CLIC адаптер (опционально) на контейнере абсорбера. **8**

3 Вставьте чистящий диск в адаптер. Закройте адаптер до щелчка.

Извлеките чистящий диск из адаптера. Закройте адаптер до щелчка. **7**

4 Отсоедините порт выдыха и датчик потока. Снимите ограничитель с датчика потока.

Присоедините ограничитель на датчике потока. Подключите датчик потока, подключите и плотно зафиксируйте порт выдыха. **6**

5 Снимите клапаны вдоха и выдыха.

Установите клапаны вдоха и выдыха. **5**

6 Снимите клапан APL.

Установите клапан APL. **4**

7 Снимите затвор с линии забора смеси для анализа газового состава (опционально).

Установите затвор на линии забора смеси для анализа газового состава (опционально). **3**

8 Снимите порт отработанного газа.

Установите порт отработанного газа. **2**

9 Снимите корпус аппарата ИВЛ. Снимите диафрагму.

Вставьте диафрагму, установите корпус аппарата ИВЛ. **1**

Сборка

Компактная дыхательная система линейки аппаратов Dräger Fabius Инструкции по повторной обработке



	Ручная очистка и дезинфекция	Автоматическая очистка и дезинфекция	Стерилизация
	✗	✓	✓
	✓	✗	✗
	✓	✗	✓
	✗	✓	✗

Расположите элементы таким образом, чтобы обеспечить хорошее промывание внутренних пространств и поверхностей и свободный отток воды.

Визуальный осмотр



Данные рекомендации не отменяют инструкции по применению и не являются ее заменой.

После автоматической очистки и дезинфекции требуется стерилизация горячим паром (сухожаровая) для высушивания дыхательной системы. **Клапаны, корпус дыхательного аппарата и рукав AGS:** Убедитесь, что чистящие и ополаскивающие жидкости проникают через раскрытый клапан. Слейте воду, скопившуюся в диафрагме аппарата. Дополнительные указания и пояснения приведены в соответствующих инструкциях по применению.